

Утяжеленный жилет «Сова»



Рекомендуется для детей:

- ✚ при дцп (детский церебральный паралич);
- ✚ при нарушении сна;
- ✚ при сдвг (синдром дефицита внимания и гиперактивности);
- ✚ при тревожных расстройствах;
- ✚ при агрессивном поведении;
- ✚ при аутизме и расстройстве аутистического спектра;
- ✚ при синдроме аспергера.

Назначение:

- ✚ предназначен для усиления проприоцептивной обратной связи;
- ✚ дополнительной сенсорной стимуляции;
- ✚ снятия тревожности и напряжения;
- ✚ уменьшает проявление эмоциональных реакций;
- ✚ улучшения концентрации внимания.

Утяжеленный жилет «Сова»



Методические рекомендации:

Принцип действия жилета, основан на методе глубокого тактильного давления. Вес жилета, усиливает проприоцептивную обратную связь. Это помогает ребенку восполнить сенсорный голод, лучше осознать положение своего тела в пространстве. Глубокое давление также активизирует парасимпатическую нервную систему, вследствие чего организм переходит из состояния «постоянной боевой готовности» к расслаблению. Это очень важно для детей с нарушениями сенсорной интеграции, у которых часто преобладает режим работы симпатической нервной системы, из-за чего они находятся в состоянии повышенной возбудимости.

Использование утяжеленного Жилета Совы, показано не только детям с особенностями развития. Его применение будет полезно и для здорового ребенка – глубокое давление поможет ему успокоиться, снять состояние перевозбуждения после активных игр, нахождения в компании шумных сверстников, сосредоточиться на уроках или другой деятельности, просто отдохнуть и почувствовать себя комфортно.