

Развивающий коррекционный комплекс с видеоуправлением МОБИ Соло

Рекомендуется для категорий детей:

- ✚ с трудностями в развитии речи, психики, здоровья;
- ✚ с трудностями в обучении;
- ✚ с сохранным интеллектом;
- ✚ неговорящих, не понимающих обращенную речь;
- ✚ с расстройством аутистического спектра;
- ✚ с нарушениями интеллекта;
- ✚ с сенсорными расстройствами.

Назначение:

- ✚ подготовка к школе, адаптация к нагрузкам в младших классах, преодоление трудностей в обучении;
- ✚ развитие внимания и навыка сосредоточения;
- ✚ тренировка памяти и скорости реакции;
- ✚ развитие координации движений;
- ✚ развитие когнитивных навыков;
- ✚ слухомоторное развитие;
- ✚ тренировка навыка контроля движения и точности движения рук.



Развивающий коррекционный комплекс с видеоуправлением МОБИ Соло



Методические рекомендации:

Используйте:

1. Наглядно-действенный показ
 2. Метод указания и объяснения
 3. Многократное повторение практических действий
 4. Управление в компьютерной игре производится за счет движений, совершаемых играющим.
- Поощряйте ребенка.

Развивающие упражнения:

Комплекс включает 6 разделов. Каждый раздел содержит обширную библиотеку заданий, представленных по степени усложнения и с учетом развития тренируемые двигательные и когнитивные функции.

Игра «Волшебные кубики» На экране изображены кубики с узором. Тренирующийся проводит шариком по кубикам, и они переворачиваются, открывая картинку. Задача играющего — открыть все кубики, выполняя произвольные движения рукой (на первом уровне). Со второго уровня появляется условие движения. Стрелка на экране показывает, какое движение надо совершить, чтобы открыть кубики. Необходимо перевернуть все кубики и увидеть картинку.